



Kessler

Emobil Experten Team

Montageanleitung Edelstahl-Gehhilfenhalter Flexi


Art.-Nr.: ZE1076F

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen
Edelstahl-Gehhilfenhalter Flexi!

Mit diesem hochwertigen Zubehör können
Sie Ihre Gehhilfen sicher und bequem an
Ihrem E-Mobil mitführen. In den folgenden
Schritten zeigen wir Ihnen, wie Sie den
Halter zusammenbauen und zuverlässig
montieren.

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, um
eine optimale Befestigung und lange Freude
an Ihrem Produkt zu gewährleisten.

**Bitte überprüfen Sie vor der Montage
des Gehhilfenhalters, ob Ihr Sitz für die
zusätzliche Belastung geeignet ist.**

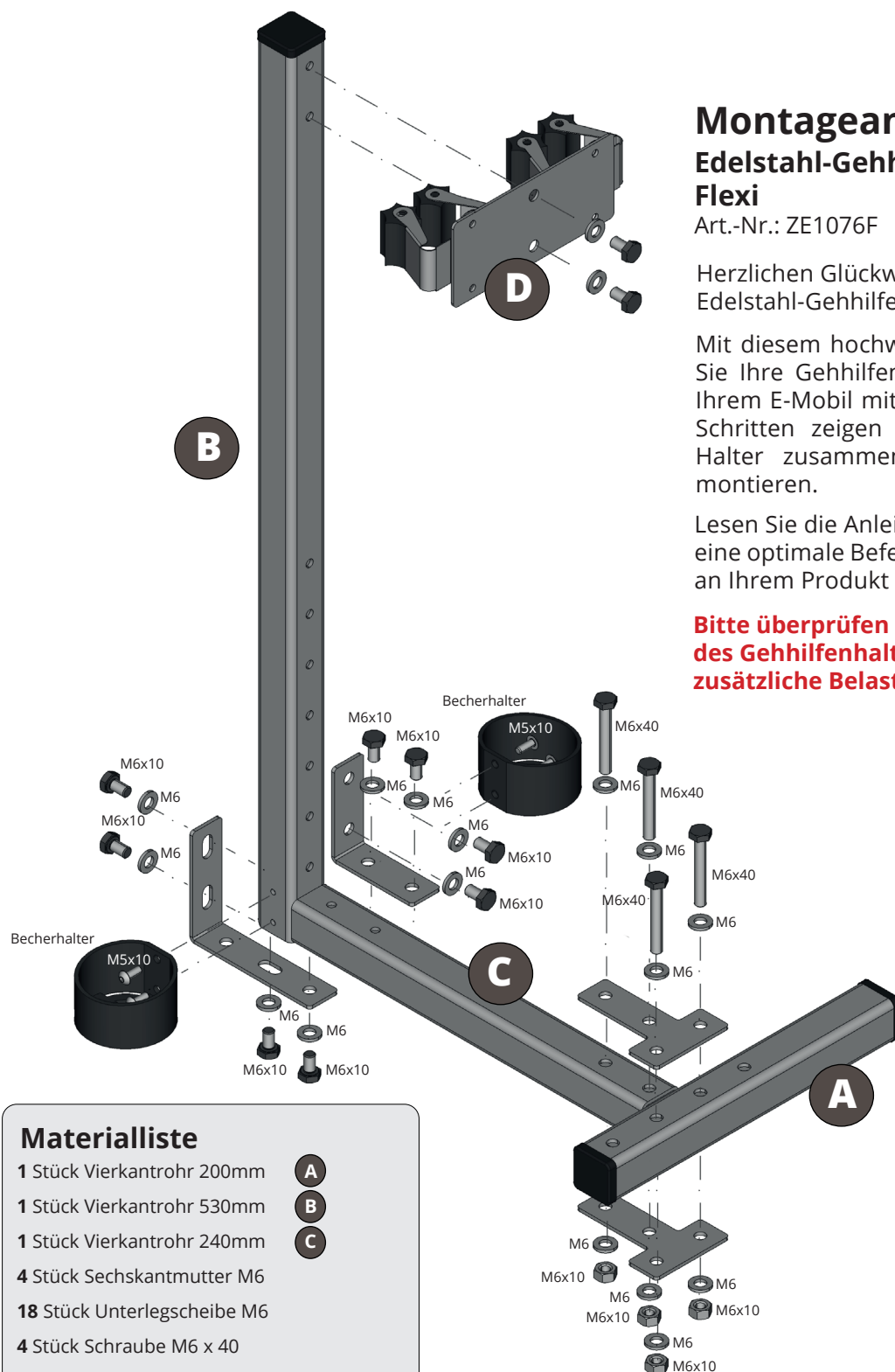

Materialliste


- 1 Stück Vierkantröhr 200mm A
- 1 Stück Vierkantröhr 530mm B
- 1 Stück Vierkantröhr 240mm C
- 4 Stück Sechskantmutter M6
- 18 Stück Unterlegscheibe M6
- 4 Stück Schraube M6 x 40
- 10 Stück Schraube M6 x 10
- 4 Stück Linsenkopfschraube M5 x 10
- 2 Stück T-Verbinder
- 1 Stück Befestigungswinkel 65 x 80mm
- 1 Stück Befestigungswinkel 55 x 55mm
- 1 Stück Grundplatte mit Klemmschellen D
- 2 Stück Gehstock-Haltebecher

Benötigtes Werkzeug (nicht enthalten)

- 2 Stück Ring- oder
Maulschlüssel 10mm
- 1 Stück Inbusschlüssel M5



Abb.1

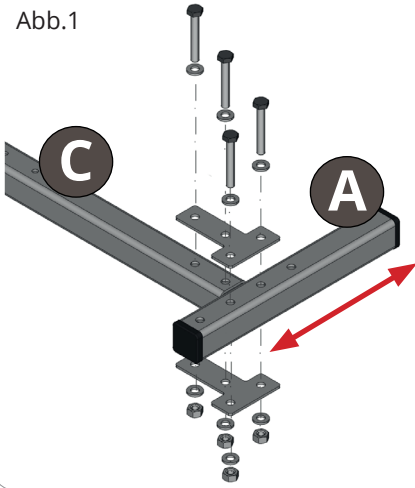

Schritt 1: Verbindung der Teile A + C

Verbinden Sie die Teile A und C mithilfe der T-Verbinder. Die Verbindung ist variabel einstellbar und kann an die individuellen Bedürfnisse sowie an die jeweilige Einbausituation am Fahrzeug, beispielsweise die Position der Sitzaufnahme, angepasst werden.

Schritt 2: Verbindung der Teile B + C

Verbinden Sie die Teile B und C mithilfe der Befestigungswinkel (Abb.2). Die Höhe kann über die vorhandenen Verbindungs Löcher flexibel eingestellt werden. Bei einer tieferen Positionierung von Teil B (Abb.3) muss der untere Befestigungswinkel entsprechend gedreht werden.

Abb.2


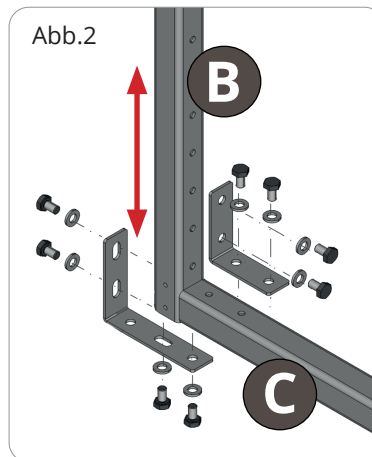


Abb.3

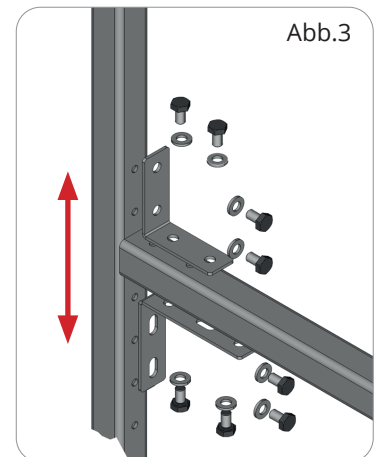

Schritt 3: Haltebecher und Klemmschellen befestigen

Befestigen Sie die beiden Gehstock-Haltebecher am unteren Ende von Teil B (Abb.4). Danach befestigen Sie die Halterung mit den Klemmschellen am oberen Ende des Gehstockhalters (Abb.5).

Abb.4


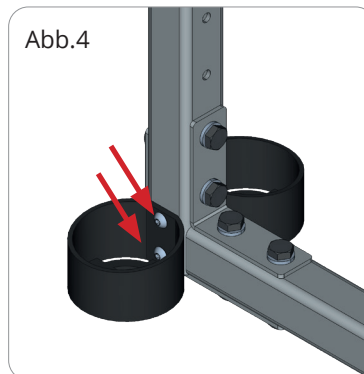


Abb.5

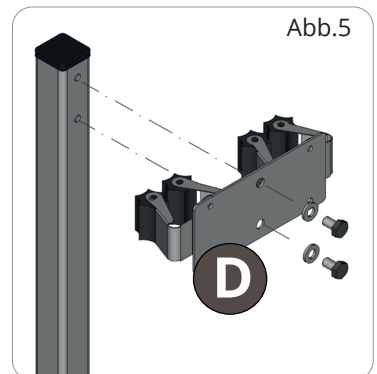

Schritt 4: Montage des Halters am Fahrzeug

Der Halter ist nun vollständig zusammengebaut und kann abschließend am Fahrzeug montiert werden.

Stecken Sie dazu Teil 4 in die Vierkantaufnahme unterhalb des Sitzes und befestigen Sie es mit der dafür vorgesehenen Schraube (Abb.6).

Abb.6



Bitte überprüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.

EET Kessler GmbH & Co. KG
Marburger Str. 1c
35649 Bischoffen
Telefon: 06444-221 98-0
E-Mail: onlineshop@eet-kessler.de

Wir wünschen Ihnen gute Fahrt!
Emobil Experten Team Kessler