

Montageanleitung

Befestigungsband Beinschutzdecke

Mit dieser warmen wind- und wasserdichten Beinschutzdecke aus Nylonmaterial und Webpelz schützen Sie Ihre Beine bei Ausflügen an unbeständigen Tagen vor Regen und Wind. Durch zwei angenähte Schlaufen mit Schnellverschluss, die um die Armlehnen gelegt werden, wird ein Verrutschen der Decke verhindert. Ausserem ist durch diese einfache Befestigung ein schnelles und problemloses Anlegen der Beinschutzdecke garantiert. Die Beinschutzdecke wird nicht mit dem Körper verbunden, lediglich die Füße stehen in dem eingnähten Fussraum.

Die Beinschutzdecke ist warm unterfüttert



Montage der Befestigungsbänder:



Legen Sie die Einzelteile der Befestigungsbänder wie im Bild vor sich auf den Tisch.

Wichtig ist, dass die Steckerseite mit der Verzahnung nach oben zeigt.



Sie benötigen weitere Informationen oder haben Probleme bei der Montage? Dann rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern! Tel.: 06444 - 925 73 62

Die Beinschutzdecke ist nun bereit für die Befestigung am Fahrzeug. Je nach Modell kann die Befestigung variieren. Setzen Sie sich auf Ihr Fahrzeug und stellen Sie als erstes die Füße in den vorgesehenen Fußraum der Beinschutzdecke. Anschließend schlagen Sie die Decke über die Beine und suchen sich für die Befestigung der Bänder eine Möglichkeit am Fahrzeug. Dies kann zum Beispiel ein Holm vom Sitz, des Rahmens oder der Armlehnen sein.

Beispiel: Montage der Befestigungsbänder am E-Mobil



Beispiel: Montage der Befestigungsbänder am Rollstuhl



Sie benötigen weitere Informationen oder haben Probleme bei der Montage? Dann rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern! Tel.: 06444 - 925 73 62